

# Anweisung Perdelle - Swan



Bild 1

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>1. WICHTIG</b>	<b>3</b>
<b>2. VERPACKUNG - GEWICHT – ABMESSUNGEN</b>	<b>4</b>
<b>3. BEZEICHNUNG DER TEILE</b>	<b>5</b>
<b>4. MONTAGE</b>	<b>6</b>
<b>5. EINSTELLUNG DER GUMMISCHEIBEN</b>	<b>16</b>
<b>6. EINSTELLUNG DER GUMMIBÂNDER SPANNUNG</b>	<b>17</b>
<b>7. ANWENDUNG</b>	<b>19</b>
<b>8. WARTUNG - PFLEGE - REINIGUNG</b>	<b>19</b>

## 1. WICHTIG

---

- LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DER MONTAGE VOLLSTÄNDIG DURCH.
- Der Benutzer haftet für den Fall, dass Perdelle-Swan nicht für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Perdelle-Swan und sein Zubehör dürfen nur von einem Techniker montiert werden. Im Falle eines Bruchs, einer Beschädigung oder eines Herunterfallens des Geräts aufgrund einer fehlerhaften Montage haftet ausschließlich der Techniker und Perdelle kann nicht zur Verantwortung gezogen werden. Im Zweifelsfall sollte sich der Techniker mit Perdelle in Verbindung setzen.
- Die Perdelle-Swan-Vorrichtung darf nicht verändert werden.
- Der auszustattende Sitz muss original sein und darf nicht verändert worden sein. Jeder Sitz, an dem vor dem Einbau von Perdelle-Swan Änderungen vorgenommen wurden, würde die Garantie von Perdelle in Frage stellen.
- Überprüfen Sie die Montage nach einigen Stunden Benutzung, dann zwei Wochen lang einmal pro Woche und danach regelmäßig einmal pro Monat.
- Überprüfen Sie die beiden unten aufgeführten Maße, um Perdelle-Swan installieren zu können.


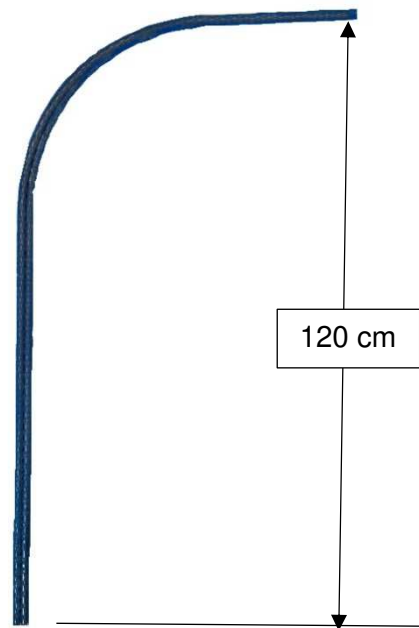


Bild 2

## 2. VERPACKUNG - GEWICHT – ABMESSUNGEN

Bei der Lieferung erhalten Sie zwei Pakete:

- 1 Karton mit einem Gewicht von ca. 4.5 kg
- 1 Paar Bögen mit einem Gewicht von ca. 2.5 kg

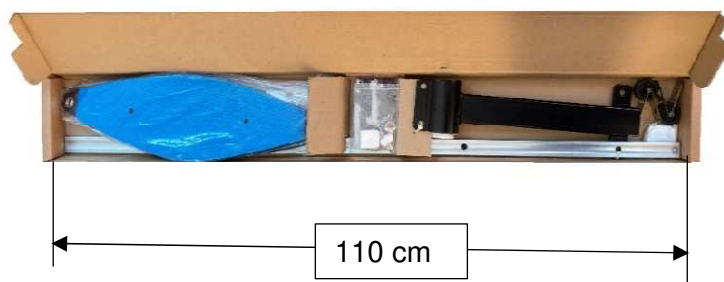

### 3. BEZEICHNUNG DER TEILE

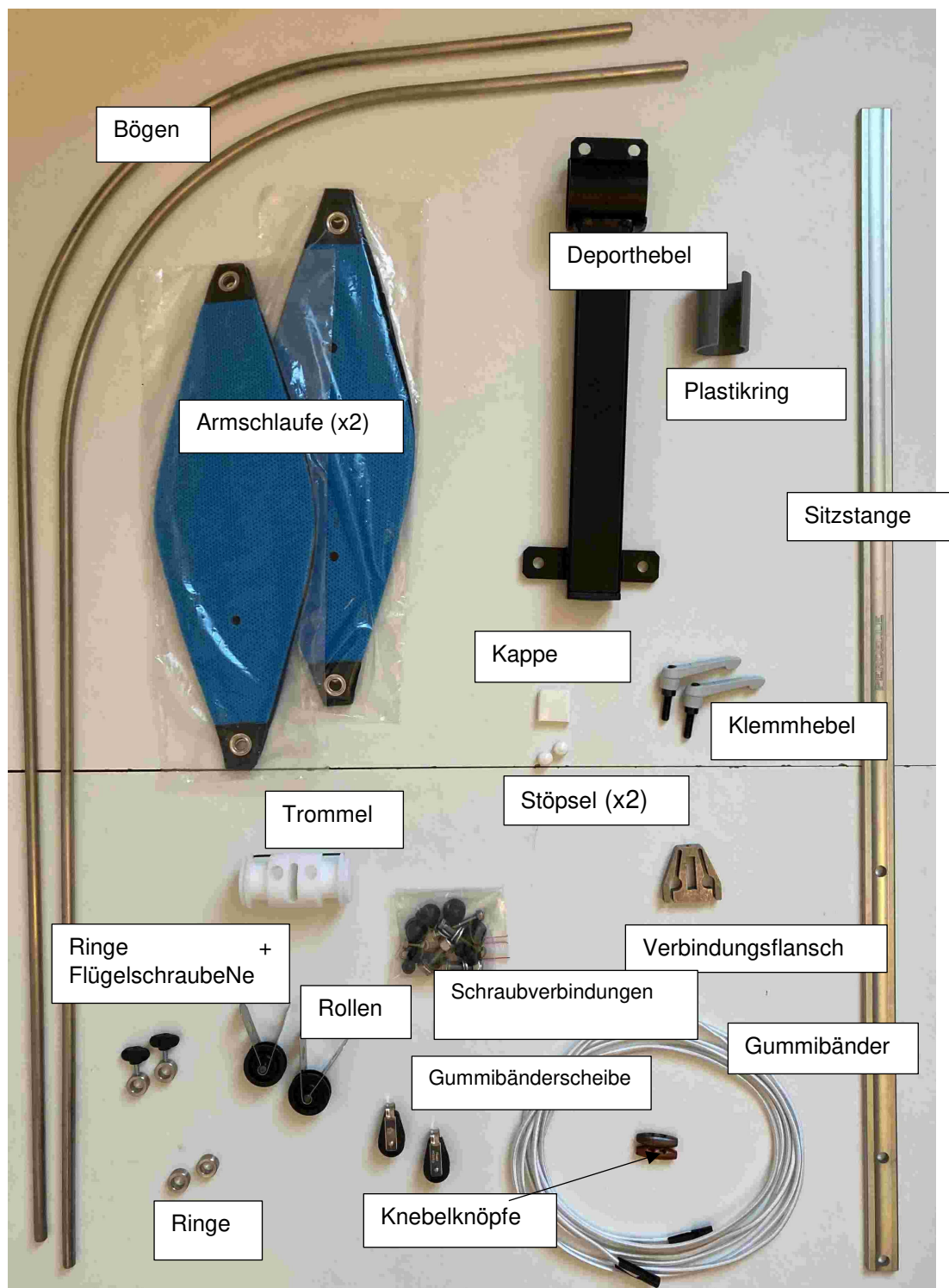


Bild 3

## 4. MONTAGE

Die Montage wird von einem Techniker durchgeführt.

Erforderliches Werkzeug:

- 2 Inbusschlüssel Größe 2,5 und 3
- 2 Schraubenschlüssel Größe 10
- 2 Schraubenschlüssel Größe 17
- 2 Flachzangen
- 1 Seitenschneider
- 1 Feuerzeug
- 1 Meter
- 1 farbiger Filzstift



Bild 4 : Um die Montage zu erleichtern, setzen Sie den Sitz



Bild 5 : Ansicht des oberen Teils





Bild 6 : Der erste Schritt besteht darin, das Deporthebel am Zylinderkörper zu installieren. Dazu...

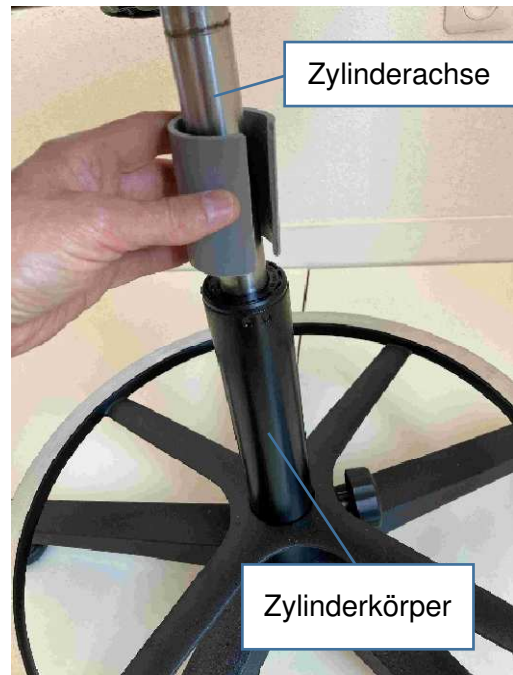


Bild 7: ...den Plastikring über die Verriegelungsstange schieben und dann...



Bild 8 : ...die Hand (oder mit den Zangen) die Ringöffnung auf spreizen, um ihn auf...



Bild 9: ...den Zylinderkörper zu montieren...

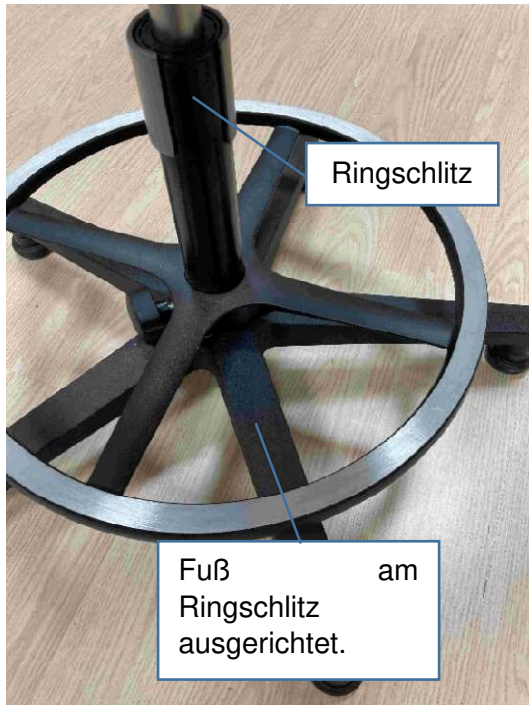


Bild 10 : Orientieren den Schlitz vom Plastikring, per Hand grob mit einem Sitzfuß.

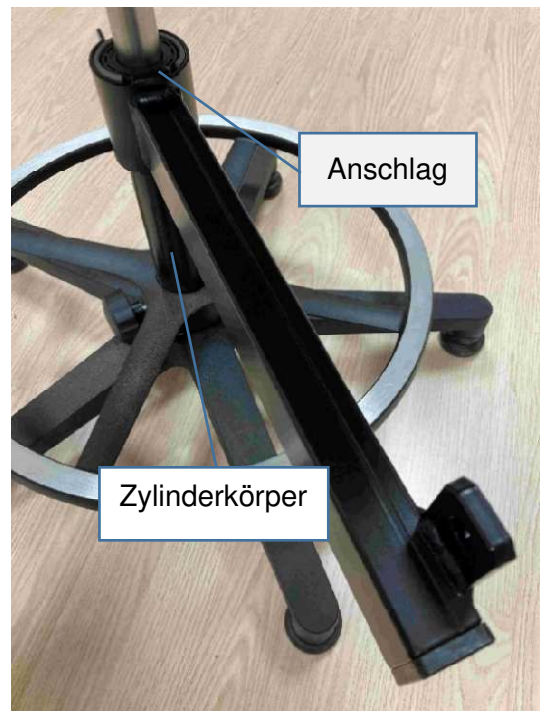


Bild 11 : Senken Sie die Deporthebel ab, bis ihr Anschlag den Zylinderkörper berührt. Die Schlitzte im Plastikring und in der Schnittstelle müssen gegen über liegend.



Bild 12 : Verwenden Sie die Bolzen, um die Deporthebel festzuziehen, bis er mäßig in seiner Rotation blockiert ist. Überprüfen Sie, ob der Sitz auf- und absteigen kann. Wenn der Sitz nicht mehr hochfährt, lockern Sie leicht die Bolzen.

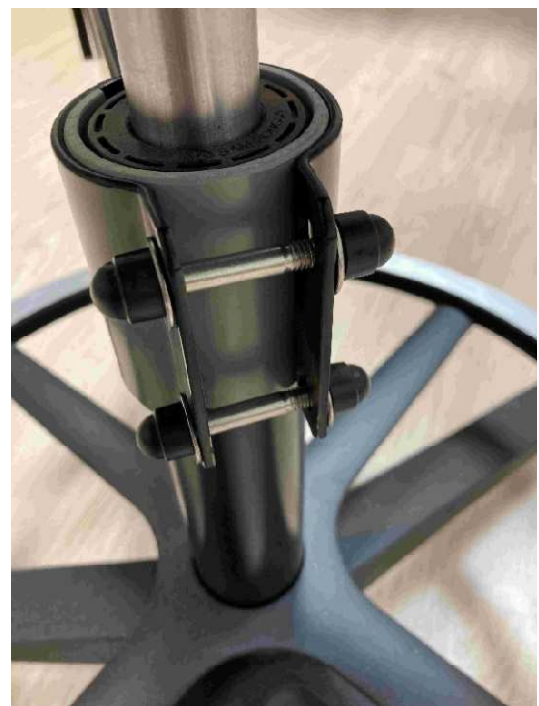


Bild 13 : Setzen Sie die Mutternabdeckungen auf.





Bild 14 : Montieren Sie die Sitzstange mit Hilfe der beiden großen Bolzen.



Bild 15 : Setzen Sie die Mutterabdeckungen auf.

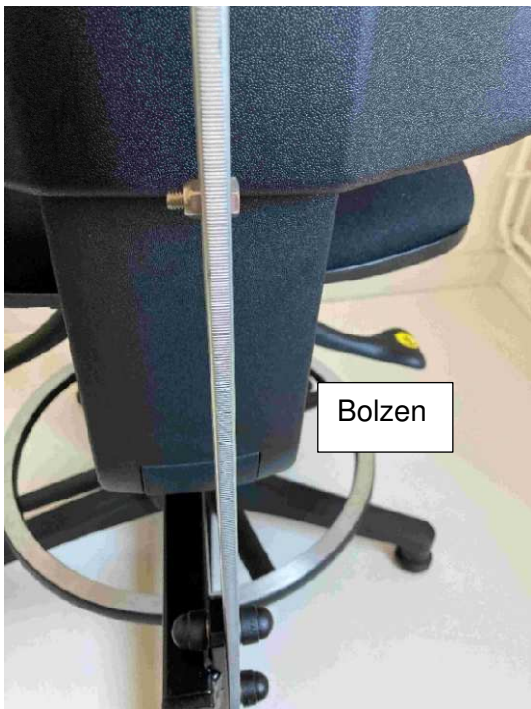


Bild 16: Schrauben Sie den kleinen M6 Bolzen fest.

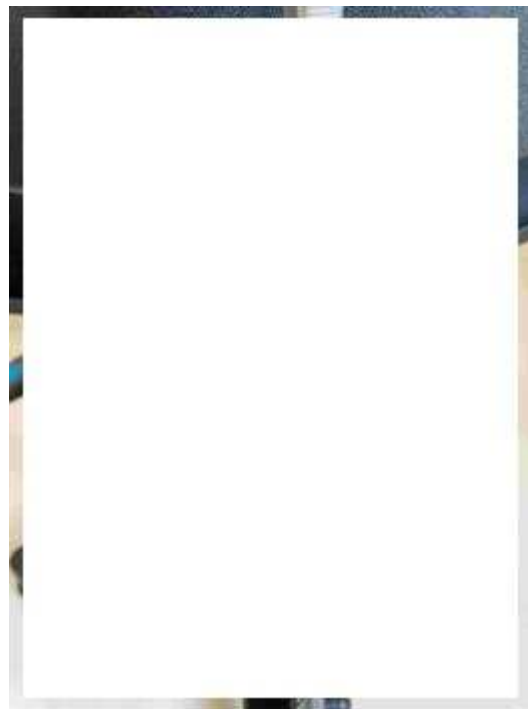


Bild 17 :



Bild 18 : Schieben Sie die Trommel mit den beiden Löchern nach hinten.

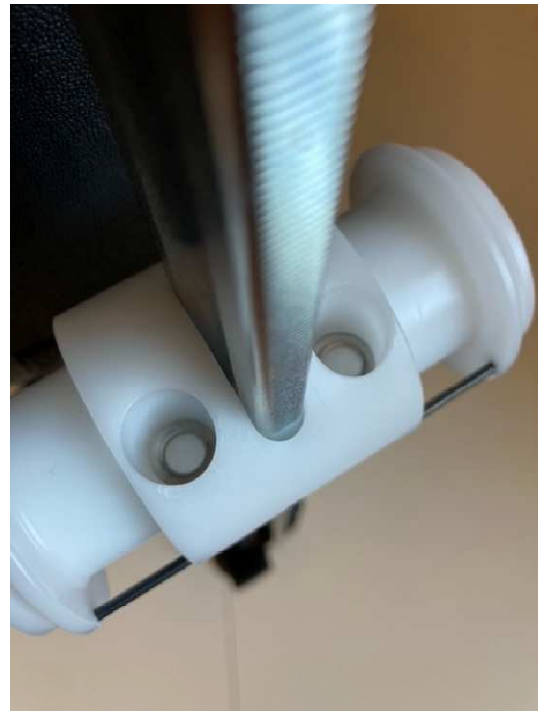


Image 19 : legen Sie die Scheiben in die beiden Löcher und achten Sie darauf, dass sie flach liegen.

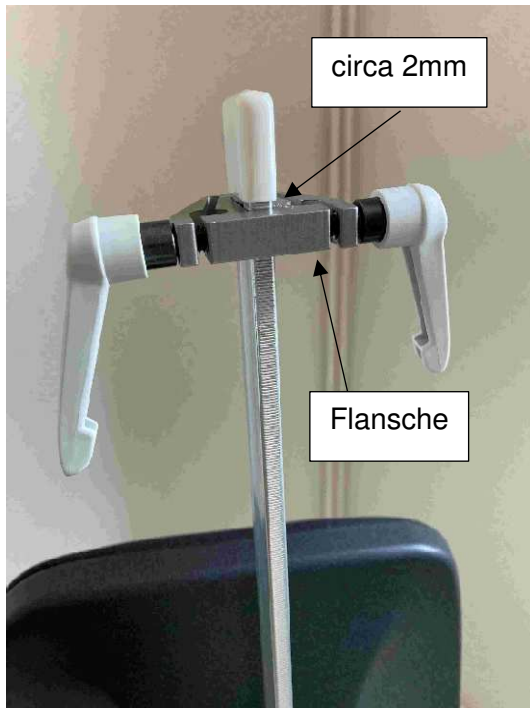


Bild 20 : Schieben Sie den Flansch auf, drücken Sie die weiße Kappe fest auf und ziehen Sie den Flansch 2 mm hoch. Ziehen Sie die Schraube des Flansches gut fest. Schrauben Sie die Klemhebeln locker an.



Bild 21 : Schieben Sie einen Bogen durch den Flansch in das Loch von der Trommel und ziehen Sie dabei einen Ring durch, wie in Abbildung 24 gezeigt. Der Bogen sollte am Boden des Lochs aufliegen. Ziehen Sie den Hebel leicht an, um zu verhindern, dass sich der Bogen in alle Richtungen dreht.



Bild 22 : Die Ringe vorerst nicht festziehen.



Bild 23 Montieren Sie den zweiten Bogen und den zweiten Ring wie auf Bild 24. Ziehen Sie den Klemhebel zweiten Bogens leicht an.



Bild 24



Bild 25 : Schieben Sie die Ringe bis zum Anschlag gegen die Halterung und ziehen Sie sie fest. Diese Sicherungsringe verhindern, dass die Bögen herausrutschen und aus den Löchern der Trommel fallen, falls unsachgemäß gehandhabt wird. Die Hebel sind drehbar. Sobald sie festgezogen sind, können sie durch Ziehen ausgerichtet werden.





Bild 26 : Drücken Sie die Riemenscheibenhalterung zusammen und schieben Sie sie grob, wie auf dem Bild gezeigt.



Bild 27 : Schieben Sie die Ringe und Flügelschrauben wie auf Bild gezeigt...



Bild 29 : schieben Sie die Gummibänderscheiben und setzen Sie die beiden kleinen weißen Stopfen ein.



Bild 30 : Montage des Knebelknopfs auf den Gummibändern. Dazu...



Bild 31 ...schieben Sie den Knebelknopf 40 cm vom schwenkbaren Ende.



Bild 32 Fädeln Sie das weiße Ende durch die Schlaufe.



Bild 33 : Stellen Sie sicher, dass die beiden Längen identisch sind. Die Einheit ist bereit zur Montage



Bild 33 : Führen Sie die Gummibänder durch die Gummibänderscheiben und positionieren Sie die Knobelknöpfe an den Enden gegen die Riemenscheiben.



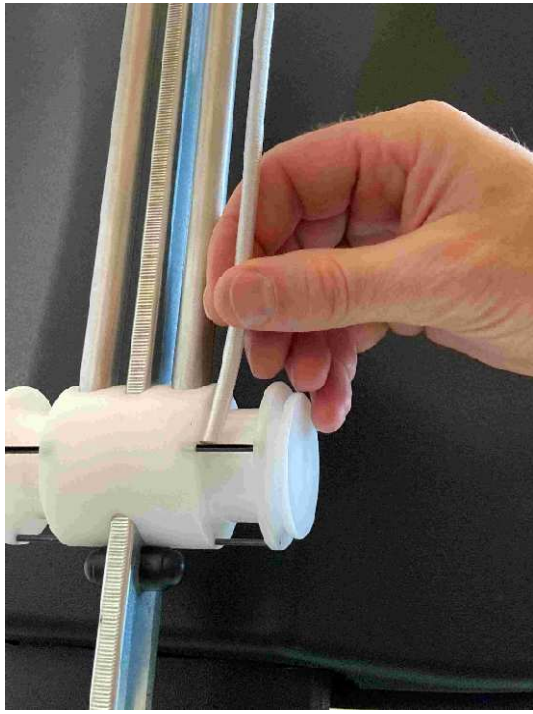


Bild 34 : Führen Sie die Gummibänder durch den ersten Stift

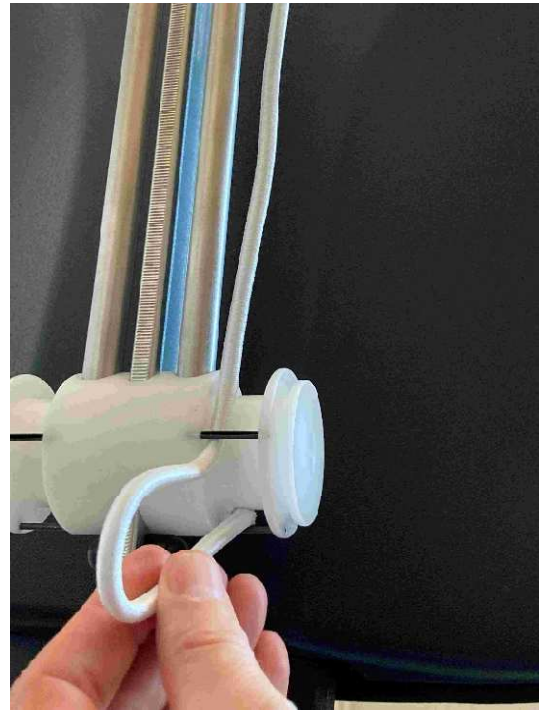


Bild 35 : ... und durch den zweiten Stift.

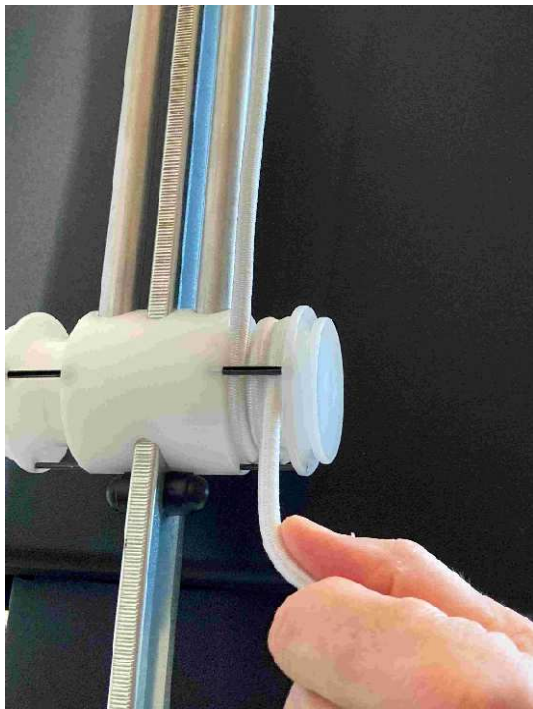


Bild 36 : Machen Sie 2 vollständige Umdrehungen (führen Sie nicht erneut durch den unteren Stift)

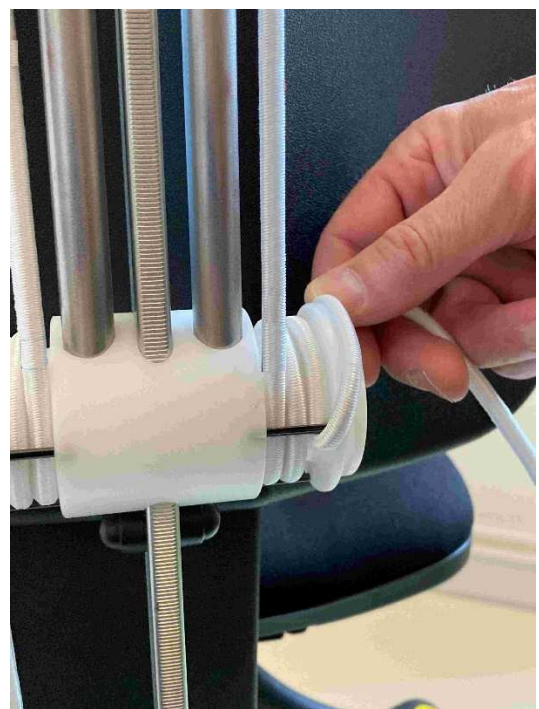


Bild 37 : ... klemmen Sie das Gummiband in die dafür vorgesehene Klemmfuge der Trommel..



Bild 38 : Führen Sie das schwenkbare Ende in die Ösen der Armschlaufe und...

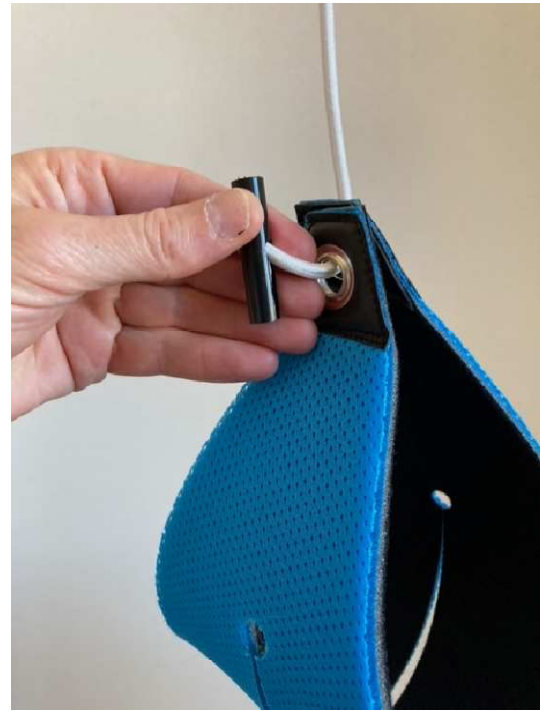


Bild 39 : ... ..das schwenkbare Ende umklappen. Die Armschlaufe ist installiert.



Bild 40 : Schneiden Sie gegebenenfalls 80 cm vom herabhängenden Teil des Gummibands ab und verbrennen Sie das Ende, um das Ausfransen zu verhindern. Achten Sie darauf, dass die entstehende Hitze keine Gefahr



Bild 41 : Platzieren Sie das Anleitungsetikett gut sichtbar. Perdelle-Swan ist bereit zur Verwendung.

## 5. EINSTELLUNG DER GUMMISCHLEIBEN



Bild 42 und Bild 43 : Positionieren sie die vorderen Gummischieben oberhalb des Ellbogenbereichs (ungefähr vertikale Elastikbänder). Verwenden Sie dazu die Drehung der Bögen und das Verschieben der Riemenscheiben entlang der Bögen zu ermöglichen.



Bild 43



## 6. EINSTELLUNG DER GUMMIBÄNDER SPANNUNG



Bild 44 In der montierten Konfiguration bietet Ihnen Perdelle-Swan etwa 1,5 kg Halt pro Arm



Bild 45 : Wenn Sie mehr Kraft wünschen, nehmen Sie das Gummi aus seiner Klemmfuge, schieben Sie das Gummi einige Zentimeter nach unten, legen Sie das Gummi wieder in die Fuge (Bild 46) und testen Sie erneut den Komfort. Wiederholen Sie den Vorgang, bis der Benutzerkomfort erreicht ist. Achten Sie beim Einstellen darauf, dass der Benutzer die Armschlaufen nicht nutzt.

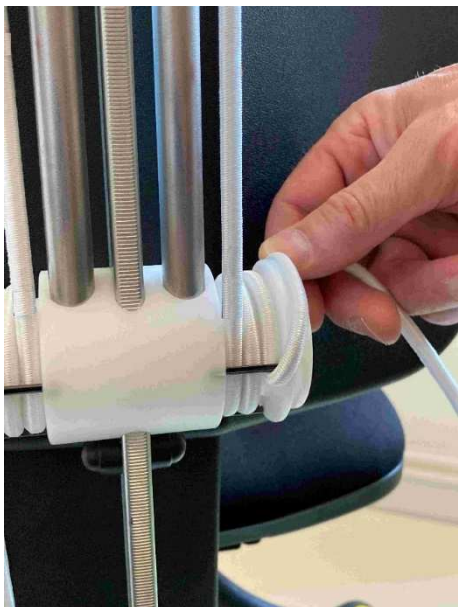


Bild 46

- Testen Sie kurz Perdelle-Swan.
- **WICHTIG** : Im Ruhezustand sollten sich die Arme nie über der Arbeitsebene befinden, wie in Abbildung 47 gezeigt. Verwenden Sie die Einstellung, um zu Bild 48 zu gelangen.



Bild 47



Bild 48

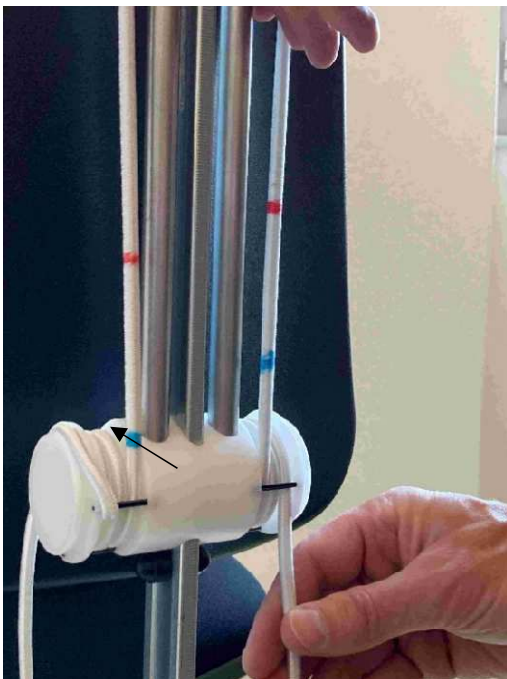


Bild 49 : Nach erfolgter Einstellung verwenden Sie einen farbigen Filzstift, um die Position zu markieren. Bei mehreren Benutzern können mehrere farbige Striche gemacht werden.



## **7. ANWENDUNG**

---

- ACHTUNG: Ziehen Sie die Armschlaufen nur an und aus, wenn Sie sitzen. Ziehen Sie die Armschlaufen nicht an, wenn Sie stehen.

- Perdelle-Swan ist kein Handgriff! Ziehen Sie nicht daran, um den Sitz zu bewegen

- Der Benutzer wird sich sehr schnell an den von Perdelle-Swan gebotenen Komfort gewöhnen.

Innerhalb weniger Stunden wird der Benutzer die feine Einstellung finden, die zu ihm passt.

- Die Armschlaufen werden normalerweise auf Höhe der Ellbogen platziert. Die Ellenbogenspitze

passt in den Schlitz der Armschlaufen, um das Verrutschen entlang der Arme zu reduzieren. Die

Armschlaufen können auch entlang der Unterarme je nach individuellem Komfort platziert werden.

Klammern können bei Bedarf hinzugefügt werden, um die Armschlaufen enger am Arm zu befestigen.

- Während der Verwendung überprüfen Sie, dass sich in der oberen und unteren Position des Sitzes

kein Element mit der Deporthobel oder einem Bestandteil von Perdelle-Swan berührt.

- Wenn mehrere Bediener Perdelle-Swan verwenden, können Sie für jeden Bediener einen eigenen

Armschlaufensatz verwenden. Es sind zwei Paare im gelieferten Karton enthalten.

## **8. WARTUNG - PFLEGE - REINIGUNG**

---

• ACHTUNG: Überprüfen Sie die Montage nach einigen Stunden Gebrauch, dann einmal pro Woche für 2 Wochen und anschließend regelmäßig einmal im Monat.

• Ersetzen Sie das Gummibandpaar, wenn ein Gummi verschlissen oder beschädigt ist.

• Perdelle-Swan erfordert keine besondere Wartung. Ein Abstauben mit einem weichen Tuch ist

ausreichend. Verwenden Sie keine chemischen Produkte. Schäden, die durch die Verwendung

chemischer Produkte entstehen könnten, sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Im Zweifelsfall

kontaktieren Sie Perdelle.