

# NOTICE PERDELLE TAYA



# **1. SOMMAIRE**

<b>1. SOMMAIRE</b>	<b>P.2</b>
<b>2. IMPORTANT</b>	<b>P.3</b>
<b>3. CONDITIONNEMENT</b>	<b>P.4</b>
<b>4. NOM DES COMPOSANTS</b>	<b>P.5</b>
<b>5. MONTAGE</b>	<b>P.6</b>
<b>6. RÉGLAGE DE LA POSITION DES POULIES</b>	<b>P.14</b>
<b>7. RÉGLAGE DE LA FORCE DES ÉLASTIQUES</b>	<b>P.15</b>
<b>8. UTILISATION</b>	<b>P.17</b>
<b>9. MAINTENANCE</b>	<b>P.17</b>

## 2. IMPORTANT

### A. LIRE ENTIEREMENT LA PRESENTE NOTICE AVANT MONTAGE.

B. L'utilisateur engage sa responsabilité dans le cas où Perdelle Taya n'est pas utilisé pour la destination auquel il est prévu.

C. Perdelle Taya et ses accessoires sont montés impérativement par un technicien. En cas de casse, de détérioration ou d'une chute du dispositif dû à un mauvais montage, seule la responsabilité du technicien serait engagée et Perdelle ne pourrait être mis en cause. En cas de doute, le technicien doit prendre contact avec Perdelle.

D. Ne pas modifier le dispositif Perdelle Taya.

E. Le siège à équiper doit être d'origine et ne pas avoir été modifié. Tout siège ayant fait l'objet de modifications avant l'installation de Perdelle Taya verrait la garantie Perdelle remise en question.

F. Vérifiez le montage après quelques heures d'utilisation puis une fois par semaine pendant 2 semaines puis ensuite et régulièrement une fois par mois.

G. Mettre et enlever les brassières seulement lorsqu'on est assis.

H. Perdelle Taya n'est pas une poignée ! Ne pas tirer dessus pour déplacer le siège.

I. Lors de l'utilisation, vérifier qu'en position haute et basse du siège, aucun élément entre en collision avec Perdelle Taya et l'environnement de travail.


J. Le montage des composants en bois s'effectue avec les mains propres.

K. Vérifier la dimension ci-dessous pour pouvoir installer Perdelle Taya. Cette dimension est quasiment commune à toutes les assises munies d'un vérin.




### 3. CONDITIONNEMENT

- Carton d'environ 5kg et épaisseur 6cm

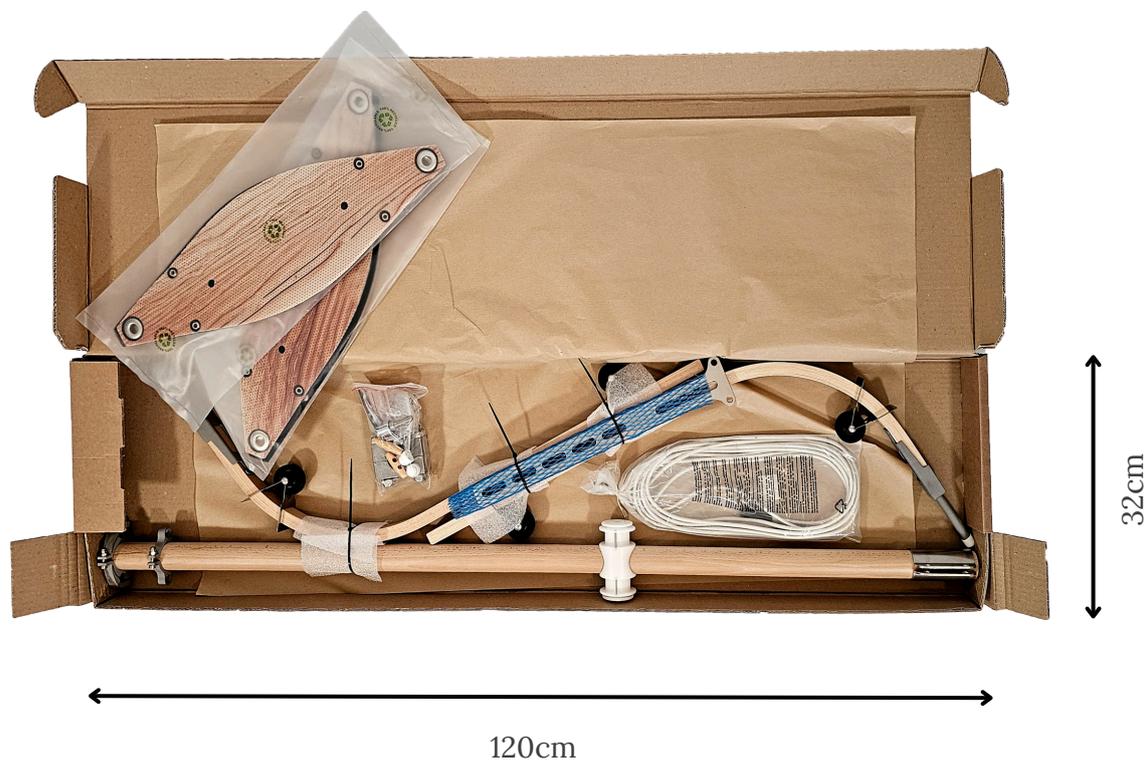

## 4. NOM DES COMPOSANTS

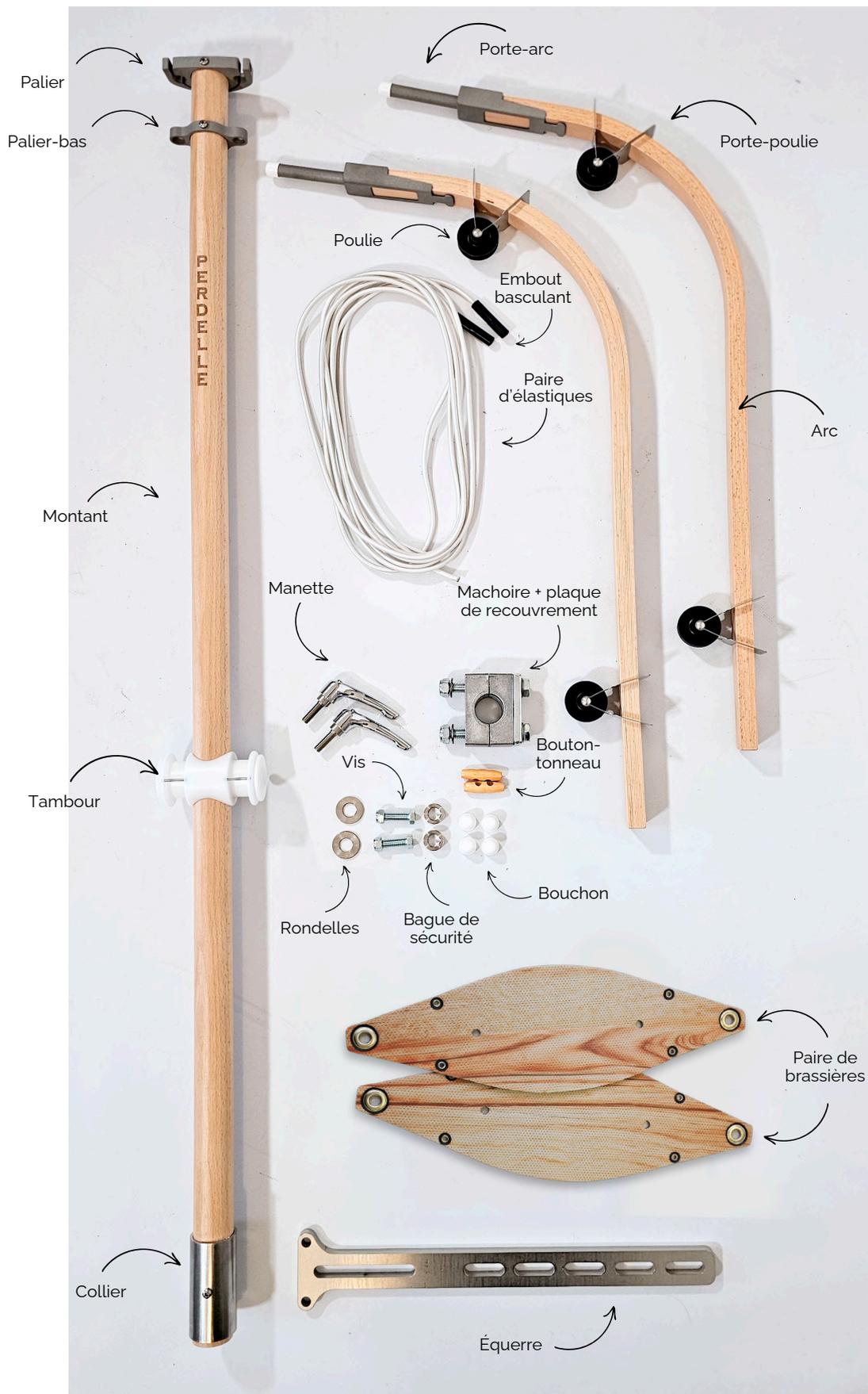

## 5. MONTAGE

Le montage doit être effectué par un technicien.

Outillage nécessaire :

- 1 clef BTR n°2.5
- 2 clefs de 13
- 2 clefs de 17



Image 5 : Pour faciliter le montage,  
remonter à fond le siège.



Image 6 : préparer la paire de mâchoires et la plaque de recouvrement.



Image 7 : placer une mâchoire avec la plaque de recouvrement. Ne pas oublier deux rondelles.



Image 8 : placer l'équerre en anticipant l'image 15.



Image 9 : mettre les deux autres rondelles et les écrous.



Image 10 : presser l'ensemble.



Image 11 : coulisser le plus haut possible....



Image 12 : ... avec l'équerre en pente douce.



Image 13 : placer le collier côté vérin.



Image 14 : serrer l'ensemble.



Image 15 : en desserrant un peu les mâchoires, optimiser l'espace entre le montant et le dossier.



Image 16 : ajouter les quatre capuchons.



Image 17 : pour la suite du montage, descendre au maximum le siège.



Image 18 : retirer les bouchons de protection.



Image 19 : insérer la rondelle...



Image 20 : ... puis insérer l'ensemble dans les paliers...



Image 21 : ... tout en insérant la bague de sécurité.



Image 22 : remonter la bague de sécurité et la serrer.



Image 23 : visser les manettes.



Image 24 : cette option assure une hauteur constante des brassières, quelle que soit la force de traction des élastiques.



Image 25 : pour son montage glisser le bouton-tonneau à environ 40 cm de l'embout basculant.

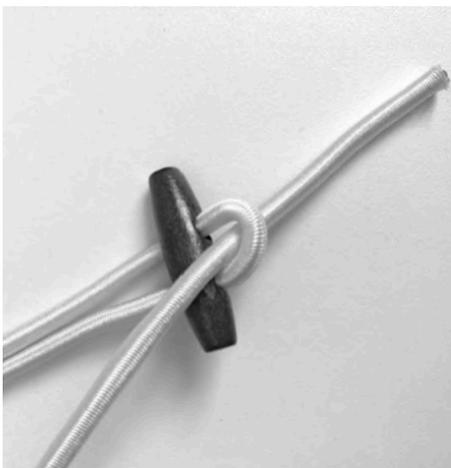


Image 26 : repasser l'extrémité blanche dans la boucle.

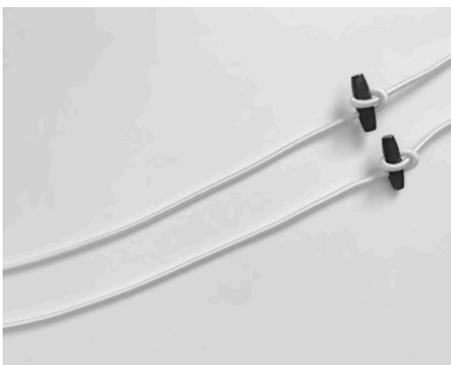


Image 27 : l'ensemble est prêt à être monté.



Image 28 : passer les élastiques dans les poulies, les boutons-tonneaux en butée contre les poulies.



Image 29 : passer les élastiques dans la 1ere goupille puis...



Image 30 : ... dans la 2eme goupille.



Image 31 : faites 2 tours complets (ne pas repasser une 3eme fois dans la 2eme goupille), puis...



Image 32 : ...coincer l'élastique dans la gorge du tambour prévue à cet effet.



Image 33 : Passer l'embout basculant dans les oeillets des brassières puis ...



Image 34 : ... basculer l'embout. La brassière est installée. La deuxième paire de brassières permet un roulement en cas de lavage machine.





Image 35 : attacher l'étiquette de recommandation de façon visible.



Image 36 : Perdelle Taya est prêt à être réglé.

## 6. RÉGLAGE DE LA POSITION DES POULIES

Positionner les poulies avant au-dessus de la zone des coudes (élastiques approximativement verticaux). Pour cela, utiliser la rotation des arcs et le coulisement des poulies le long des arcs.

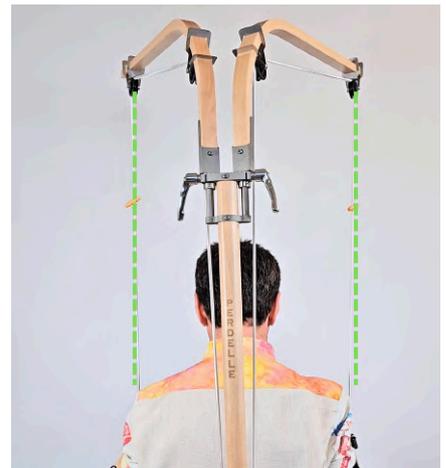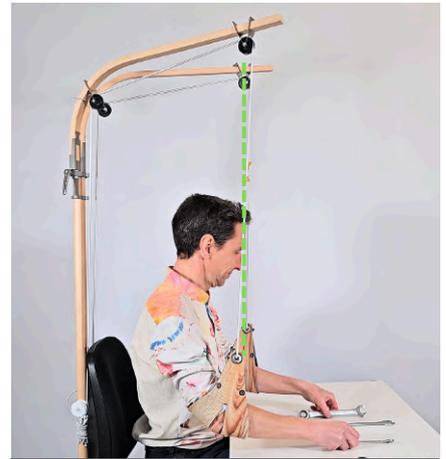

## 7. RÉGLAGE DE LA FORCE DES ÉLASTIQUES



Image 43 : après avoir sorti l'élastique de sa gorge, faire coulisser l'élastique plus ou moins haut en fonction du confort recherché...

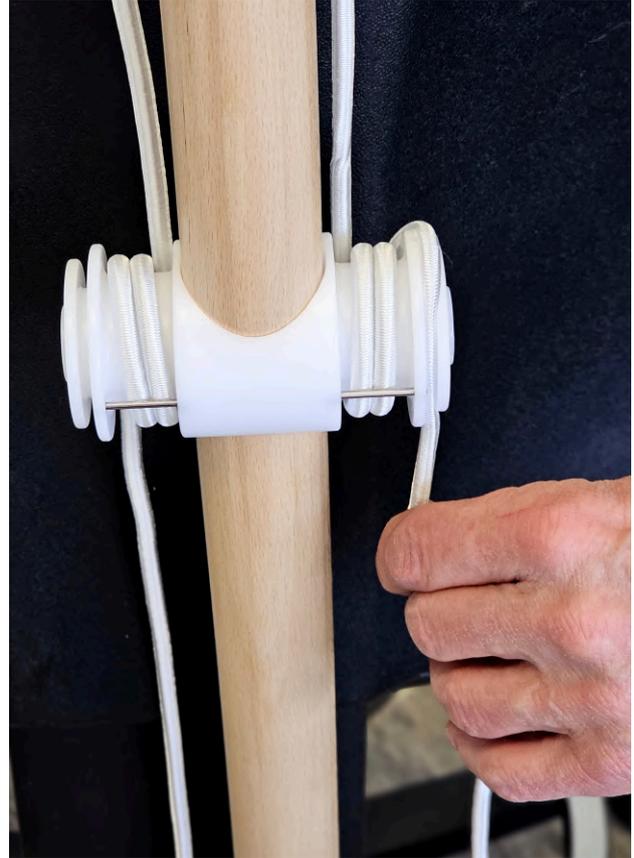


Image 44 : ... puis replacer l'élastique dans sa gorge.

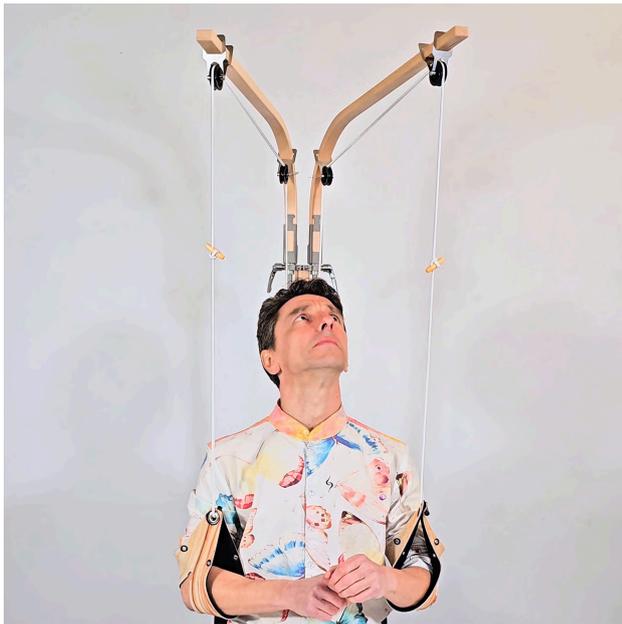


Image 45 : tester la force des élastiques à la recherche de votre confort. Si besoin procéder à un nouveau réglage. **IMPORTANT** : au repos dans les brassières, les bras ne doivent pas se retrouver **au-dessus** du niveau de travail. Jouer avec la force des élastiques. La force à droite et à gauche doit être approximativement identique.

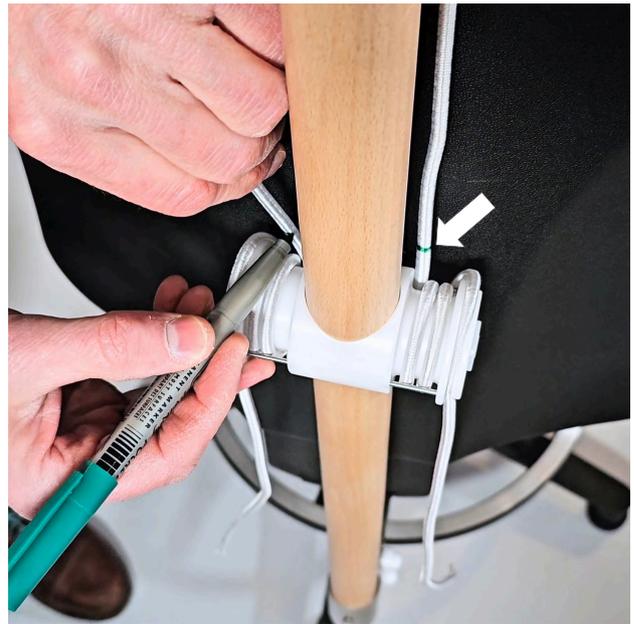


Image 46 : une fois la force réglée, tracer au feutre une marque circulaire sur les élastiques. Il peut y avoir autant de marques colorées que d'utilisateur.



Image 47



## **8. UTILISATION**

- L'utilisateur/trice va très rapidement s'habituer au confort offert par Perdelle Taya. L'utilisateur trouvera rapidement le réglage fin qui lui correspond.
- Les brassières se placent dans l'idéal au niveau des coudes. La pointe du coude entre dans la fente de la brassière pour réduire les glissements le long des bras. Lors de certains gestes, les brassières peuvent glisser. Pour éviter cela, les brassières sont resserables grâce aux petits oeillets et un cordon ou élastique fourni par l'utilisateur.
- Si plusieurs opérateurs utilisent Perdelle Taya, il est possible d'utiliser une brassière par utilisateur/trice. Il y a deux paires dans le carton livré.

## **9. MAINTENANCE**

- Changer la paire d'élastique si un élastique est usé ou abimé.
- Perdelle Taya ne requiert pas d'entretien particulier. Un dépoussiérage au chiffon doux est suffisant. Ne pas utiliser de produit chimique. Les dégâts éventuels générés par l'emploi de produits chimiques ne sont pas couverts par la garantie. En cas de doute contacter Perdelle.
- Les brassières sont lavables en machine à laver à 30°.